




1. Kontrollera att visiret är funktionsdugligt och utan sprickor.

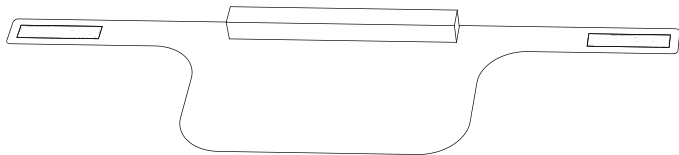

2. För visirets band runt huvudet.

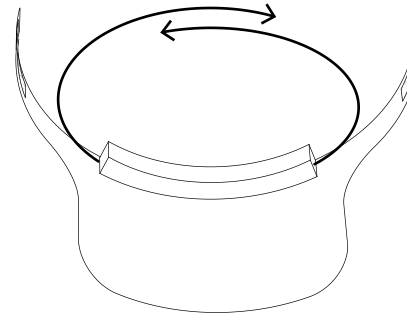

3. Anpassa passform med kardborrbandet i nacken.

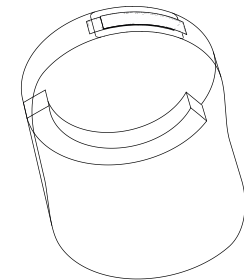

signworks.

Skyddsvisir avsett för användning för skydd mot dropp och luftburen smitta
Visiret är provat enligt MET5659 utgåva 2 och uppfyller kraven med undantag av punkt 4 Klarhet.

Denna produkt omfattas av ett från arbetsmiljöverket tillfälligt tillstånd för tillverkning och distribution och får därför inte säljas vidare på den öppna marknaden.

Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje avsändare.

Produkten rengörs med alkoholbaserade desinfektionsmedel.

Produkten kan lagerhållas i sin förpackning i 6 månader, visir som lagerhålls i mer än 3 månader bör kontrolleras innan användning.

Produkt utan förpackning förvaras utom sol/ljus i temperaturer mellan +1 till +30 grader celsius

Signworks Ab, instrumentvägen 29, 12653 Hägersten, order@signworks.se

Visiret är provat av RISE Research Institutes of Sweden AB

Box 857, SE-50115 BORÅS

Anmält organ nr 0402